



Points de vérification de la mise en place du XCollar

Emegear, LLC recommande d'appliquer ces étapes pratiques du XCollar. Une formation validée par un formateur est en effet indispensable. Avant toute utilisation terrain, veuillez vous assurer que vous êtes à l'aise avec l'utilisation du produit dans toutes les situations :

Application générale du XCollar
S – A – X Application en position neutre
1. PREPARATION (S)
Allonger le XCollar le plus possible. Déplier la partie arrière et la bloquer.
2. AJUSTER (A)
Placer l'attelle autour du cou de la victime en positionnant le menton sur le rembourrage antérieur, sous la mentonnière, puis fermer la boucle latérale.
Maintenir l'attelle tout en ajustant les 2 sangles Velcro latérales blanches l'une après l'autre, selon la position de la victime en utilisant le principe d'opposition de force (Pousser / Tirer)
Maintenir l'attelle tout en ajustant la partie antérieure sur la poitrine puis la bloquer à l'aide des 2 verrous.
3. MISE EN PLACE SANGLES CROISEES (X)
Fixer les sangles colorées en les croisant pour les fixer sur les emplacements Velcro colorés correspondant. Toujours utiliser le principe d'opposition de force.
Utiliser le guide sous le menton pour le passage des sangles croisées.
Vérifier que le XCollar est fixé et correctement appliqué sans causer de torsion sur la colonne vertébrale du patient.
Application en « position trouvée » et en procubitus
Effectuer correctement les 3 points S – A - X de l'application générale du XCollar
Ajuster tout d'abord la sangle latérale du côté visible et serrer ensuite l'autre sangle latérale.
Allonger et bloquer le support de poitrine réglable symétriquement ou asymétriquement en s'assurant que le contact se fait bien avec le sternum.
Fixer tout d'abord la sangle croisée du côté visible et ensuite la seconde sangle croisée.
Application en décubitus
Effectuer correctement les points S – A - X de l'application générale du XCollar en incluant les précautions suivantes :
Faire glisser la partie arrière de l'attelle à un angle de 45 degrés jusqu'à la ligne médiane entre les omoplates (ne pas hésiter à tirer les vêtements en même temps).
La redresser parallèlement aux épaules et la glisser sous la nuque par un mouvement de cisaillement.
Fermer l'attelle grâce à la boucle à décrochage rapide en prenant les repères évoqués plus haut.
Dégagement des voies aériennes
Desserrer uniquement la mentonnière pour utiliser un ballon de réanimation, maintenir fermement le masque sur le visage du patient.
Desserrer la mentonnière, retirer les sangles croisées de couleur puis desserrer les sangles latérales afin de procéder à l'intubation.
Pose du maintien de tête





&



Utiliser la quantité adéquate de mousses prédécoupés pour la région occipitale tout en respectant l'alignement du patient.

Retirer légèrement la sangle bleue croisée de la joue pour placer l'extrémité carrée en Velcro de la sangle de fixation noire. Replacer la sangle bleue sur l'extrémité carrée en Velcro de la sangle de fixation noire. (répéter pour l'autre côté)

Enrouler la sangle de fixation autour de l'ouverture la plus adaptée du plan dur utilisé. Tendre cette sangle noire sans TROP SERRER. Répéter cette procédure de l'autre côté (sangle jaune latérale et sangle noire de fixation).



Fiche de vérification de compétence

Nom :	Agence :	Date :
Application générale du		
S-A-X Application en position neutre		
1. SETUP (PREPARATION)		✓
Allonger le XCollar le plus possible. Déplier la partie arrière et la bloquer.		
2. AJUSTER		✓
Placer l'attelle autour du cou de la victime en positionnant le menton sur le rembourrage antérieur, sous la mentonnière, puis fermer la boucle latérale.		
Maintenir l'attelle tout en ajustant les 2 sangles Velcro latérales blanches l'une après l'autre, selon la position de la victime en utilisant le principe d'opposition de force (Pousser / Tirer)		
Maintenir l'attelle tout en ajustant la partie antérieure sur la poitrine puis la bloquer à l'aide des 2 verrous.		
3. MISE EN PLACE SANGLES CROISEES (X)		✓
Fixer les sangles colorées en les croisant pour les fixer sur les emplacements Velcro colorés correspondant. Toujours utiliser le principe d'opposition de force.		
Utiliser le guide sous le menton pour le passage des sangles croisées.		
Vérifier que le XCollar est fixé et correctement appliqué sans causer de torsion sur la colonne vertébrale du patient.		
Application en « position trouvée » et en procubitus		
Effectuer correctement les points S – A – X de l'application générale du XCollar		
Serrer tout d'abord la sangle latérale du côté visible et ensuite serrer l'autre sangle latérale.		
Allonger et bloquer le support de poitrine réglable symétriquement ou asymétriquement en s'assurant que le contact se fait bien avec le sternum.		
Fixer tout d'abord la sangle croisée du côté visible et ensuite la seconde sangle croisée.		
Application en décubitus		
Effectuer correctement les points S – A – X de l'application générale du XCollar		
Faire glisser la partie arrière de l'attelle à un angle de 45 degrés jusqu'à la ligne médiane entre les omoplates (ne pas hésiter à tirer les vêtements en même temps).		
La redresser parallèlement aux épaules et la glisser sous la nuque par un mouvement de cisaillement.		
Fermer l'attelle grâce à la boucle à décrochage rapide en prenant les repères évoqués plus haut.		
Dégagement des voies aériennes		
Desserrer uniquement la mentonnière pour utiliser un ballon de réanimation, maintenir fermement le masque sur le visage du patient.		
Desserrer la mentonnière, retirer les sangles croisées de couleur puis desserrer les sangles latérales afin de procéder à l'intubation.		
Mise en place du maintien de tête		
Utiliser la quantité adéquate de pièces prédécoupées pour la région occipitale tout en respectant l'alignement du patient.		
Détacher la sangle croisée et attacher la sangle de fixation au Velcro, puis rattacher la sangle croisée (répéter pour l'autre côté)		
Enrouler la sangle de fixation autour de l'ouverture la plus adaptée du plan dur utilisé.		
Nom de l'évaluateur :		Signature :
<i>En signant ce formulaire, le formateur vérifie que l'élève nommé sur le haut de cette page a passé avec succès toutes les étapes de manipulation nécessaires et que la fiche de vérification de compétence est en conformité avec les recommandations du fabricant.</i>		